



PARKINSON HOLTHER STAT-ON

Συνοπτικός Οδηγός για Ασθενείς

Παραλαβή του Αισθητήρα / HOLTHER


Ο γιατρός σας, θα σας δώσει το PARKINSON HOLTHER STAT-ON, μία ζώνη και ένα φορτιστή.



Ο γιατρός θα ρυθμίσει το HOLTHER, θα το ενεργοποιήσει και θα το τοποθετήσει στη μέση σας. Σε περίπτωση που απλά σας δώσει ή στείλει την συσκευή σε κατάσταση αναμονής, αυτή δεν θα καταγράφει σήματα. Θα χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε ΜΟΝΟ την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ πατώντας μία φορά το πράσινο κουμπί. Δεν θα χρειαστεί να κλείσετε ή ανοίξετε την συσκευή. Λειτουργεί αυτόνομα.

Χρήση του PARKINSON HOLTHER

Κάθε πρωί το HOLTHER θα τοποθετείται ως εξής:

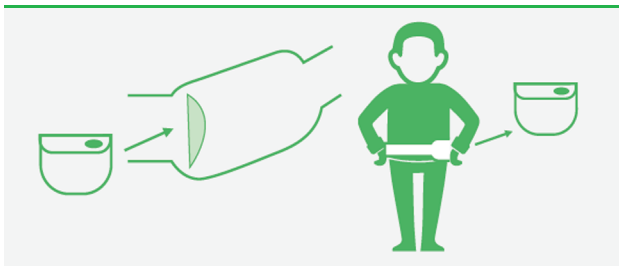

1. Θα πρέπει να μπαίνει στη ζώνη με τέτοιο τρόπο ώστε το πράσινο κουμπί να φαίνεται και να είναι από πάνω.

2. Θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στην αριστερή πλευρά της μέσης, λίγο πάνω από την ζώνη και το μέρος που βρίσκεται το πράσινο κουμπί πρέπει να είναι προς τα επάνω. Το βράδυ ή όταν κοιμάστε πρέπει να το αφαιρείτε.

Σε κανονική λειτουργία θα δείτε ότι η λυχνία LED του αισθητήρα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Όταν ο αισθητήρας είναι ακίνητος η λυχνία σβήνει και όταν ανιχνευτεί κίνηση ανάβει ξανά. Εάν ανάψει κόκκινη λυχνία ο αισθητήρας έχει σφάλμα. Αφαιρέστε τον αισθητήρα και ενημερώστε το γιατρό σας.

Βασικές συστάσεις

- Προσπαθήστε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το PARKINSON HOLTHER STAT-ON για μεγάλες περιόδους μετακινήσεων μέσα σε δημόσιες ή και ιδιωτικές συγκοινωνίες καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εάν γνωρίζετε ότι θα μετακινηθείτε με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς για πολλές ώρες, μην το χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο διάστημα.
- Προσπαθήστε να κάνετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες ως συνήθως αλλά αφαιρέστε τη συσκευή εάν πρόκειται να κάνετε σωματικές δραστηριότητες (για παράδειγμα, γυμναστήριο) ή δραστηριότητες με πολύ επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το να σφουγγαρίσετε το πάτωμα.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε το HOLTHER όποτε θέλετε ή θεωρείτε ότι χρειάζεται. Θα πρέπει απλώς να το αφήσετε ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Μην κάνετε ντους φορώντας το HOLTHER γιατί, ακόμα και αν αυτό είναι αδιάβροχο, η ζώνη είναι υφασμάτινη και θα χρειαστεί πολλή ώρα για να στεγνώσει.

Φόρτιση της συσκευής

Εάν σας έχουν παραχωρήσει φορτιστή για να φορτίσετε το HOLTHER, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στο τραπέζι με τη μεγάλη/μαύρη επιφάνεια προς τα πάνω. Συνδέστε το στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε το HOLTHER στο κέντρο της επιφάνειας φόρτισης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Ενώ η μπαταρία φορτίζεται, θα ανάψει η πορτοκαλί ένδειξη LED. Επιπλέον, η ένδειξη LED στην επιφάνεια φόρτισης θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Η διαδικασία φόρτισης μπορεί να διαρκέσει έως και 8 ώρες.
4. Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η πορτοκαλί ένδειξη LED θα σβήσει. Η ένδειξη LED στην επιφάνεια φόρτισης θα παραμείνει αναμμένη με κίτρινο χρώμα χωρίς να αναβοσβήνει. Είναι πλέον έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί.

